

BIOCREDIT COVID-19 Ag


SARS-CoV 2 Antigen test

- » První komercializace technologie Black Gold Particle na světě
(Kit vysoké senzitivity a specificity)
- » Uživatelsky příjemný duální systém barev (Kontrolní linie: Červená, Testovací linie: Černá)
- » Vyhodnocení rychlotestu (5~8 Min)
- » Jednoduchá detekce SARS-CoV2 antigenu

Technologie Black Gold Particle



Diferencovaná technologie
konjugace černého zlata

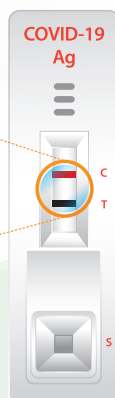

Duální systém barev

8 minut a je hotovo!



BIOCREDIT COVID-19 Ag rychlotest

Použití	Detekce SARS-CoV2 antigenu
Balení	20 Testů / kit
Skladování	1~40°C
Typ vzorku	Nasopharynx / Nasopharyngeal
Expirace	12 měsíců od data výroby
Odečet výsledků	5~8 minut

COVID-19 Rapid Diagnostic Test

POSTUP



Vložte tampon se vzorkem a
5-10krát s ním zatočte

Tampon vyjměte za
současného jemného
stlačování hlavy tamponu

Zkumavku ředícího roztoku
pevně uzavřete víčkem s
filtrem

Zkumvku s ředícím roztokem
otočte a jemně z ní vytlačte 3-4
kapky (90 ~ 150 ul) do jamky
pro vzorek (S) v testovací
kazetě

Výsledky odečítejte v
rozmezí mezi 5-8
minutami

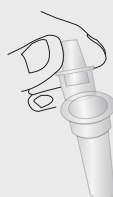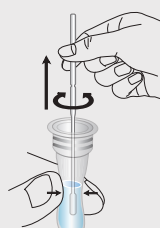

INTERPRETACE

NEGATIVNÍ



Jeden **červený** proužek v kontrolní linii "C" ve výsledkovém okně.

POZITIVNÍ



Dva proužky, **černý** v testovací linii "T" a **červený** proužek v kontrolní linii "C" ve výsledkovém okně

INVALIDNÍ



Žádný proužek v kontrolní linii "C" ve výsledkovém okně.
Je doporučeno opakované testování vzorku.

